


توضيح بالوصلات الخاصة بوحدة الأسنان

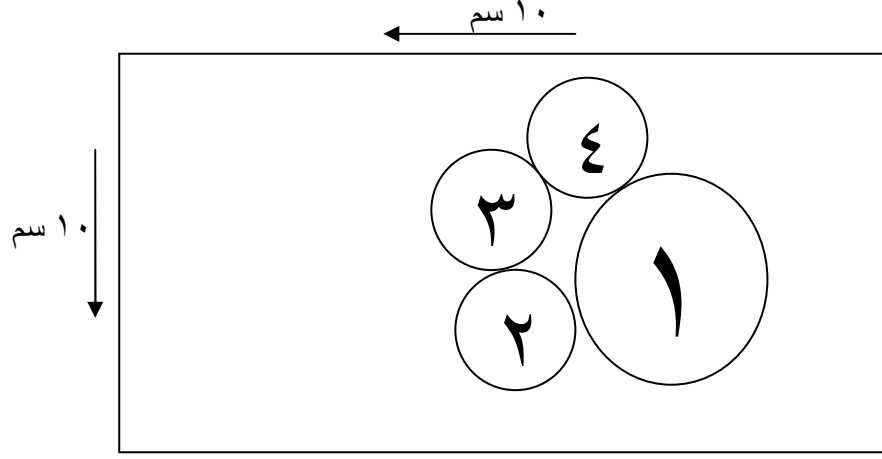

- ١- ماسورة صرف ٢ بوصة و تكون فوق البلاط بحوالي ١٠سم.
- ٢- ماسورة مياه ٠.٥ بوصة و يكون القلاووظ داخل على وش البلاط مباشرةً و تكون مياه التغذية على محبس عند مصدر التغذية الرئيسى.
- ٣- ماسورة كهرباء علاء الدين ١٦ مم أMLS و يكون بداخلها كابل كهرباء به تيار 220V و يكون على مفتاح بتشينو داخل الحيط وذلك فى حالة عدم وجود مصدر كهرباء قريب من الوحدة .
- ٤- ماسورة كهرباء علاء الدين ١٦ مم فاضيه و يكون أولها مكان الكنترول و نهايتها مكان الكمبريسور و داخلها سلك بدون كهرباء او ماسورة مياه ٠.٥ بوصة بولنبروبولين بدايتها عند الكمبريسور ونهايتها عند الكنترول بدون سلك داخلى .

ملاحظه :-

يكون محيط هذه الوصلات ما بين ١٠سم إلى ١٢سم.

شاكرين حسن تعاونكم ،،،،

مؤسسة الطبيب العربى للتجاره