

تعليمات التشغيل

١. فصل الـ Power عند مغادرة العيادة ٢. المكان الذي لا يوجد فيه تيار مستمر لابد من وجود منظم كهرباء (Stabilizer) ٣. يجب تنظيم عداد الهواء الـ (Bar) بحيث لا يزيد عن ٢.٢ حد أدنى ٤. لابد من وجود محبس أمان للمياه الداخلة للوحدة والتأكد من غلقه عند المغادرة ٥. يجب رفع الوحدة بعد انتهاء العمل يوميا إلى اعلي مستوى ووضع أي سائل في الحوض والسليفا لمنع ترسب الحشو أو أي شئ آخر	الوحدات
١- وضع ١ لتر مياه مقطرة وليس مياه مفلترة ٢- إكمال الدورة كاملة ٣- التخلص من المياه الموجودة ثم وضع مياه جديدة ٤- فصل الـ Power عند عدم الحاجة إليه	الأتوكلاف
١- تفضيه الكمبوسور يوميا وذلك لوجود مياه في الهواء ٢- يجب وضع الكمبوسور في مكان جيد للتهوية ٣- عند عدم الفصل المنتظم للكمبوسور لابد من ابلاغ الشركة	الكمبوسور
١- تطبيط الـ Bar Hand piece SM4 → 3.3 to 4.2 Hand piece TM4 → 3.8 to 4.2 Hand piece MM4 → 3.8 to 4.2 ٢- تزييت الهاندبيس كل يومين ٣- عدم فتح الهاندبيس للصيانة وإبلاغ الشركة	الهاندبيس